

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DEETAIL è un alginato per impronte dentali ad elevata definizione dei dettagli. La sua formulazione è sviluppata in maniera specifica per conferire alla miscela una marcata thixotropia, mantenendola inalterata anche nei casi in cui il rapporto di miscelazione non sia perfettamente rispettato. La massa per impronte così ottenuta mostra un corretto comportamento thixotropico, risultando stabile quando è in posizione e fluidificandosi solamente sotto pressione - diventando più scorrevole solo quando è necessario.

Questa caratteristica conferisce al materiale tre importanti proprietà:

- limita al massimo la possibilità che il materiale scorra nella gola del paziente, provocando fastidiosi ed indesiderati riflessi emetici.
- favorisce una facile penetrazione negli spazi interprossimali e nei solchi gengivali, fornendo un'impronta altamente dettagliata.
- facilita un rapido indurimento una volta inserito nel cavo orale (snap-set), combinando così un lungo tempo di lavorabilità con un tempo di presa in bocca molto ridotto.

L'utilizzo di **DEETAIL** risulta estremamente pratico, grazie anche alla sua alta idrofilia ed alla totale assenza di polvere durante le fasi di prelievo e miscelazione del materiale (trattamento dust-free).

APPLICAZIONI

- Impronte in protesi mobile e scheletrata.
- Impronte per modelli antagonisti.
- Impronte funzionali per portaimpronte individuali.
- Impronte per modelli di studio, per analisi e pianificazione.
- Impronte per modelli occlusali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(EN ISO 21563)		REGULAR SET
Colore/aroma		azzurro/menta piperita
Rapporto di miscelazione (polvere/acqua):	g/ml	9/18
Tempo di miscelazione*:	sec	30" manuale
Tempo di lavorabilità (compreso tempo di miscelazione):	min	1' 30"
Tempo di presa iniziale:	min	2' 00"
Tempo minimo di permanenza nel cavo orale:	min	1' 00"

* E' possibile utilizzare per la miscelazione apparecchi meccanici sottovuoto. Attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

DIMENSIONE IMPRONTA	POLVERE	ACQUA
impronta parziale	9 g	18 ml
Impronta totale	18 g	36 ml
Impronta totale di grandi dimensioni	27 g	54 ml

ISTRUZIONI D'USO

Agitare diverse volte la confezione prima dell'uso per uniformare i vari componenti.

Rispettando il rapporto di miscelazione indicato, versare in una scodella di miscelazione pulita (preferibilmente in silicone), la necessaria quantità d'acqua, aggiungere la relativa quantità di **DEETAIL** (precedentemente dosata), quindi miscelare energicamente con una spatola per il tempo indicato fino ad ottenere una consistenza omogenea e priva di grumi.

Utilizzando apparecchi automatici, attenersi alle istruzioni del fabbricante.

Per un risultato ottimale, consigliamo di sciacquare accuratamente l'impronta sotto un getto d'acqua non violento per rimuovere eventuali tracce di saliva e residui, scuotere per eliminare l'eccesso d'acqua, disinfettare l'impronta, quindi colare immediatamente il modello. Qualora ciò non fosse possibile, il modello può essere colato fino a 5 giorni dopo la presa dell'impronta senza subire variazioni dimensionali, conservando l'impronta umida a temperatura ambiente in un sacchetto di plastica ermeticamente chiuso. Non lasciare l'impronta all'aria o immersa nell'acqua.

Per ottimizzare i risultati raccomandiamo l'impiego dei seguenti gessi: **ULTRAMOD** (tipo II), **ORTHOMOD** (tipo III), **ULTRADIE** (tipo IV).

AVVERTENZE

Per ottenere risultati ottimali e riproducibili, durante l'uso di **DEETAIL**, raccomandiamo di:

- Rispettare scrupolosamente il rapporto di miscelazione indicato. Rapporti di miscelazione errati hanno come conseguenza la variazione, anche considerevole, dei tempi di lavorabilità e di presa, della thixotropia della miscela, nonché delle caratteristiche meccaniche della massa per impronte.
- Utilizzare per la miscelazione esclusivamente acqua demineralizzata ad una temperatura compresa tra 21 e 25 °C (50-77 °F); variazioni della temperatura e/o della durezza dell'acqua possono modificare, anche significativamente, i tempi di lavorabilità e di presa dichiarati.
- Evitare di aggiungere prodotto fresco ad un impasto già miscelato, anche parzialmente.
- Prima della colatura, sciacquare bene l'impronta o immergerla in una soluzione neutralizzante, quindi eliminare l'eccesso d'acqua prima di colare il modello per evitare alterazioni delle caratteristiche.
- L'impronta può essere trattata con le soluzioni disinfettanti comunemente in uso, seguendo le istruzioni del fabbricante.
- Conservare il prodotto in ambiente fresco ed il più possibile asciutto: l'assorbimento di umidità può causare variazioni delle proprietà fisiche, tra cui l'allungamento dei tempi di lavorabilità e di presa e la riduzione delle caratteristiche meccaniche della massa per impronte
- Evitare l'eccessiva esposizione all'aria, avendo cura di richiudere accuratamente la confezione dopo ogni prelievo.

PER LA VOSTRA SICUREZZA

Durante l'utilizzo di **DEETAIL**, raccomandiamo di:

- Evitare di inalare la polvere, indossando idonea mascherina protettiva.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente.

CONFEZIONAMENTO e CODICI ARTICOLO

REGULAR SET	
COLORE:	AZZURRO
CONFEZIONAMENTO:	CODICE ARTICOLO
Busta 453 g	AK01R453B
Fusto 8 Kg	AK01R8F
SLOW SET (disponibile su richiesta)	
COLORE:	AZZURRO
CONFEZIONAMENTO:	CODICE ARTICOLO
Busta 453 g	AK01S453B
Fusto 8 Kg	AK01S8F

STOCCAGGIO

Conservare in ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, ad una temperatura compresa tra 10 e 25 °C (50-77 °F).

I prodotti a base di alginato devono essere stoccati al chiuso e il più possibile protetti da umidità e intemperie.

Raccomandiamo, una volta aperta la confezione, di richiuderla accuratamente o, meglio, di trasferire il prodotto in un contenitore richiudibile.

DATA DI SCADENZA

Per risultati ottimali, utilizzare il prodotto entro la data di scadenza riportata su ogni confezione. Eventuali scorte di prodotto dovrebbero essere ruotate in modo che il materiale più vecchio venga utilizzato per primo.

La nostra attività di consulenza in merito all'uso dei nostri prodotti, rilasciata sia in forma verbale, scritta o dimostrativa, si basa sullo stato attuale della tecnica odontoiatrica e delle nostre migliori conoscenze. Essa è da considerarsi solo come indicazione senza alcun valore vincolante, anche con riferimento ad eventuali diritti di terzi, e non esonera l'utente dall'eseguire propri controlli sui prodotti, onde appurarne l'idoneità all'applicazione ed ai fini previsti. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo, pertanto rientrano esclusivamente nella responsabilità dell'utente. Eventuali responsabilità di danni saranno limitate al solo valore della merce fornita e utilizzata dall'utente. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento, consigliamo di leggere sempre le istruzioni per ogni nuova confezione e di contattare KIP srl in caso di dubbi derivanti da queste informazioni.