



CONPHIMASK 85 FAST SET

LAB PUTTY | HARD CONSISTENCY | SCANNABLE

descrizione

CONPHIMASK 85 è un silicone (polisilossano) elastico per il laboratorio odontotecnico.

Si presenta come una massa ad elevata viscosità, facilmente plasmabile e molto sorrevole, che miscelata manualmente con lo specifico catalizzatore **CATALYSIS gel**, polimerizza per condensazione. Indicato in tutte le applicazioni (stampaggio/registrazione) in cui è necessario riprodurre fedelmente una superficie, **CONPHIMASK 85** assicura una elevata definizione dei dettagli in ogni condizione di utilizzo. L'elevato grado di durezza raggiunto dalla massa polimerizzata, unitamente ad un eccellente recupero elastico, lo rendono particolarmente adatto in presenza di importanti sottosquadri e in tutti quei casi in cui è necessario conservare a lungo le informazioni rilevate. Le superfici ottenute con **CONPHIMASK 85** risultano facilmente scansionabili con i più comuni sistemi CAD/CAM/CIM.

applicazioni

- Mascherine per la realizzazione di:
 - protesi parziali.
 - provvisori.
 - barre.
 - denti anteriori (*protesi immediata*).
 - riproduzione gengivale (*supporto per finta gengiva in silicone - tecnica indiretta*).
 - stampaggio della ceramica.
- Realizzazione di controstampi in protesi mobile.
- Supporto per riparazione di protesi.
- Duplicazioni in genere.

vantaggi

- Miscelazione facilitata con catalizzatore in gel.
- Non untuoso al tatto.
- Reazione di polimerizzazione estremamente veloce.
- Assenza di deformazioni.
- Fedele riproduzione dei dettagli.
- Facilità di taglio e di fresaggio.
- Retrazione lineare contenuta.
- Resistente al calore fino a 120 °C.
- Rapporto prezzo/qualità estremamente vantaggioso.

caratteristiche tecniche



Rapporto di impasto:
1 misurino : 5 cm gel



Tempo di miscelazione:
30" (manuale)




Tempo di lavorabilità:
2' 00"
Tempo di presa:
4' 00"



Tempo di rimozione:
5' 00"



Durezza (24 h):
85 shore A

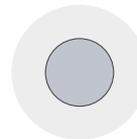

Colore:
grigio (BASE)

istruzioni d'uso

Dosare la quantità di **CONPHIMASK 85** necessaria e stenderla sul palmo della mano.

Successivamente prelevare una striscia del catalizzatore **CATALYSIS gel** della lunghezza di 5 cm per ogni misurino di prodotto prelevato, stendendola senza tirarla sul **CONPHIMASK 85** prelevato. Miscelare manualmente i due componenti per circa 30 secondi, impastandoli fino ad ottenere una massa dalla colorazione perfettamente omogenea. Modellare quindi l'impasto secondo le proprie esigenze, avendo cura di non oltrepassare il tempo di lavorabilità indicato, che è rilevato alla temperatura di 23°C. Attendere almeno 5' prima di rimuovere la mascherina e procedere alle lavorazioni successive.



CONPHIMASK 85 FAST SET

LAB PUTTY | HARD CONSISTENCY | SCANNABLE

suggerimenti per un utilizzo ottimale

Per ottenere risultati ottimali e riproducibili, durante l'uso di **CONPHIMASK 85**, raccomandiamo di:

- Manipolare il prodotto preferibilmente indossando guanti monouso.
- Richiudere accuratamente il barattolo dopo l'uso.
- Richiudere accuratamente il tubo di **CATALYSIS gel** dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare **CONPHIMASK 85** ad una temperatura ambiente il più possibile prossima a 23 °C. Temperature ambientali più elevate accelerano, anche significativamente, i tempi di lavorabilità e di presa; viceversa, temperature più basse rallentano i suddetti tempi.
- Non prolungare la miscelazione oltre i tempi indicati; questo può accelerare, anche considerevolmente, i tempi di lavorabilità e di presa, a causa del riscaldamento che si produce per frizione e per contatto con le mani.
- Preparare adeguatamente le superfici con cui **CONPHIMASK 85** andrà a contatto, che dovranno presentarsi asciutte e prive di residui oleosi per ottenere una riproduzione fedele e ben dettagliata.

per la vostra sicurezza

Durante l'utilizzo di **CONPHIMASK 85**, raccomandiamo:

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente. Consultare un oculista se permangono stati irritativi.

stoccaggio

Conservare lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra 15 e 28 °C (59-83 °F).

scadenza

Il prodotto è garantito per 24 mesi se correttamente conservato. Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza riportata su ogni confezione.

Eventuali scorte di prodotto devono essere ruotate in modo che il materiale più vecchio venga utilizzato per primo.

confezionamenti

1 barattolo 5 Kg + 2 x 60 ml CATALYSIS (gel)

codice prodotto

CONPHIMASK 85 FAST SET

1 barattolo 5 Kg + 2 x 60 ml CATALYSIS (gel)

grigio

SK03FG5F

La nostra attività di consulenza in relazione all'uso dei nostri prodotti, rilasciata sia in forma verbale, scritta o dimostrativa, si basa sullo stato attuale della tecnica odontoiatrica e delle nostre migliori conoscenze. Essa è da considerarsi solo come indicazione senza alcun valore vincolante, anche con riferimento ad eventuali diritti di terzi, e non esonera l'utente dall'eseguire propri controlli sui prodotti, onde appurarne l'idoneità all'applicazione ed ai fini previsti. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo, pertanto rientrano esclusivamente nella responsabilità dell'utente. Eventuali responsabilità di danni saranno limitate al solo valore della merce fornita e utilizzata dall'utente. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento, consigliamo di leggere sempre le istruzioni per ogni nuova confezione e di contattare Conphident in caso di dubbi derivanti da queste informazioni.