



FIXART

gesso speciale per montaggio in articolatore

FAST SET

descrizione

FIXART è un gesso speciale ideato per il montaggio dei modelli in articolatore.

La sua formulazione innovativa contiene additivi specifici che permettono un'eccezionale controllo dell'espansione di presa (solo 0,01 % dopo 2 ore); questo consente di mantenere esatte le relazioni occlusali durante il montaggio dei modelli su ogni tipo di articolatore.

FIXART ha una fase di indurimento molto rapida, presenta una adesività ottimale ed è facilmente stratificabile, per permettere un facile e preciso posizionamento sulle piastre di montaggio.

L'utilizzo di FIXART previene le distorsioni che si verificano con l'impiego di gessi non specifici.

applicazioni

- Montaggio dei modelli in articolatore.
- Preparazione di zoccoli di trasferimento nella tecnica di fresaggio.
- Mascherine.

colore



bianco

vantaggi

- Espansione di presa minima (0,01 % a 2 ore).
- Indurimento "snap set".
- Thixotropia.
- Facile stratificazione.
- Adesività ottimale.
- Tempo di presa rapido.
- Impasto plastico.

caratteristiche tecniche (secondo normativa EN ISO 6873:2013)



Rapporto di miscelazione
(acqua / polvere):
31-32 ml / 100 g



Tempo di miscelazione:
30" manuale




Tempo di lavorabilità:
2,5'
Tempo di presa:
3'-4'



Attesa per l'utilizzo
dell'articolatore:
15'



Espansione lineare
di presa (2h):
0,01 %

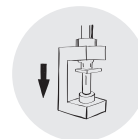

Resistenza alla compresione (1h - 24h):
22 MPa - 34 MPa

istruzioni d'uso

Prelevare la quantità di polvere necessaria alla colatura del modello, pesandola accuratamente.

Rispettando il rapporto di miscelazione, prelevare la quantità di acqua demineralizzata necessaria per l'impasto, utilizzando un cilindro graduato o, più semplicemente, pesando l'acqua direttamente nella scodella. Versare delicatamente la polvere nella scodella contenente l'acqua (non viceversa) ed attendere 15 secondi affinché la polvere sia imbibita dal liquido. Utilizzando una spatola metallica, premiscelare manualmente con delicatezza per pochi secondi, affinché tutta la polvere sia bagnata. Successivamente miscelare energicamente per il tempo indicato.

Prelevare la miscela in piccole porzioni con la spatola e versarla lentamente sulla piastra dell'articolatore, quindi posizionare il modello. Una volta effettuato il posizionamento, attendere il tempo indicato prima di utilizzare l'articolatore.



FIXART

gesso speciale per montaggio in articolatore

FAST SET

suggerimenti per un utilizzo ottimale

Per ottenere risultati ottimali e riproducibili, durante l'uso di FIXART, raccomandiamo di:

- Rispettare scrupolosamente il rapporto di miscelazione indicato. Alterazioni del rapporto di miscelazione hanno come conseguenza la variazione del tempo di lavorabilità e di presa e la riduzione, anche considerevole, dei valori di resistenza e di durezza del modello.
- Utilizzare per la miscelazione esclusivamente acqua demineralizzata ad una temperatura tra 21 e 25 °C. Alterazioni della temperatura e/o della durezza dell'acqua possono modificare, anche significativamente, i tempi di lavorabilità e di presa dichiarati.
- Evitare di aggiungere prodotto fresco (o acqua) ad un impasto già miscelato, anche parzialmente.
- Conservare il prodotto in ambiente fresco ed il più possibile asciutto: l'assorbimento di umidità può causare variazioni delle proprietà fisiche, tra cui la riduzione dei valori di durezza e l'allungamento dei tempi di lavorabilità e di presa. Evitare l'eccessiva esposizione all'aria, avendo cura di richiudere accuratamente la confezione dopo ogni prelievo.

per la vostra sicurezza

Durante l'utilizzo di FIXART, raccomandiamo di:

- Evitare di inalare la polvere.
- Indossare una protezione adeguata per gli occhi durante le fasi di taglio e rifinitura del modello.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente.

confezionamenti

sacco 25 Kg in carta cucito + sacco interno PE 150 µm
 cartone 20 Kg con maniglia + sacco interno PE 150 µm
 fusto 15 Kg in PP con sigillo di garanzia
 fusto 5 Kg in PP con sigillo di garanzia
 busta 1 Kg in film alluminato triplo spessore (10 x)

stoccaggio

- Conservare in ambiente fresco ed il più possibile asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, ad una temperatura compresa tra 10 e 25 °C (50-77 °F).
- Raccomandiamo, una volta aperta la confezione, di richiuderla accuratamente o, meglio, di trasferire il prodotto in un contenitore richiudibile.

scadenza

Per risultati ottimali, utilizzare il prodotto entro la data di scadenza riportata su ogni confezione. Eventuali scorte di prodotto dovrebbero essere ruotate in modo che il materiale più vecchio venga utilizzato per primo.

codice prodotto FAST SET (REGULAR / SLOW SET disponibili su richiesta)

FIXART FAST SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
bianco	GK07FW25S	GK07FW20C	GK07FW15F	GK07FW5F	GK07FW1B

La nostra attività di consulenza in relazione all'uso dei nostri prodotti, rilasciata sia in forma verbale, scritta o dimostrativa, si basa sullo stato attuale della tecnica odontoiatrica e delle nostre migliori conoscenze. Essa è da considerarsi solo come indicazione senza alcun valore vincolante, anche con riferimento ad eventuali diritti di terzi, e non esonera l'utente dall'eseguire propri controlli sui prodotti, onde appurarne l'idoneità all'applicazione ed ai fini previsti. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo, pertanto rientrano esclusivamente nella responsabilità dell'utente. Eventuali responsabilità di danni saranno limitate al solo valore della merce fornita e utilizzata dall'utente. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento, consigliamo di leggere sempre le istruzioni per ogni nuova confezione e di contattare Conphident in caso di dubbi derivanti da queste informazioni.