



FLASKER

Gesso speciale per muffole

REGULAR SET

descrizione

FLASKER è un gesso duro dalle eccellenti caratteristiche di lavorabilità, che unite ad un grado intermedio di durezza, lo rendono il prodotto d'elezione per la realizzazione di stampi e controstampi in muffola. Il tempo di lavorabilità del prodotto è calibrato per migliorare l'efficienza e la produttività del vostro laboratorio; la muffola è pronta per l'iniezione dell

applicazioni

- Realizzazione di stampo/controstampo in muffola nella protesi mobile.
- Modelli preliminari.
- Modelli di studio.

colore



vantaggi

- Consistenza cremosa.
- Scorrevolezza extra.
- Superfici lisce e dettagliate.
- Agevole rimozione del manufatto protesico.
- Espansione di presa bilanciata per molteplici utilizzi.
- Rapporto prezzo/qualità estremamente vantaggioso.

caratteristiche tecniche (secondo normativa EN ISO 6873:2013)



Rapporto di miscelazione
(acqua / polvere):
38-40 ml / 100 g




Tempo di miscelazione:
60" manuale



Tempo di lavorabilità:
5'
Tempo di presa:
9'-11'



Espansione lineare
di presa (2h):
0,14 %

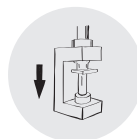

Resistenza alla compres-
sione (1h - 24h):
52 MPa - 84 MPa

istruzioni d'uso

Prelevare la quantità di polvere necessaria alla realizzazione dello stampo/controstampo, pesandola accuratamente. Rispettando il rapporto di miscelazione, prelevare la quantità di acqua demineralizzata necessaria per l'impasto, utilizzando un cilindro graduato o, più semplicemente, pesando l'acqua direttamente nella scodella. Versare delicatamente la polvere nella scodella contenente l'acqua (non viceversa) ed attendere 15 secondi affinché la polvere sia imbibita dal liquido. Utilizzando una spatola metallica, premiscelare manualmente con delicatezza per pochi secondi, affinché tutta la polvere sia bagnata. Successivamente miscelare energicamente per il tempo indicato. Prelevare la miscela in piccole porzioni con la spatola e versarla lentamente nell'impronta (posta sopra ad un vibratore regolato al minimo), facendola scorrere a partire da una estremità distale. Rispettando questa indicazione si evita la possibilità di inglobare bolle d'aria nel modello finale. Appena riempita l'impronta interrompere la vibrazione, quindi attendere il tempo indicato prima di rimuovere il modello.



FLASKER

Gesso speciale per muffole

REGULAR SET

suggerimenti per un utilizzo ottimale

Per ottenere risultati ottimali e riproducibili, durante l'uso di FLASKER, raccomandiamo di:

- Rispettare scrupolosamente il rapporto di miscelazione indicato. Alterazioni del rapporto di miscelazione hanno come conseguenza la variazione del tempo di lavorabilità e di presa e la riduzione, anche considerevole, dei valori di resistenza e di durezza del modello.
- Utilizzare per la miscelazione esclusivamente acqua demineralizzata ad una temperatura tra 21 e 25 °C. Alterazioni della temperatura e/o della durezza dell'acqua possono modificare, anche significativamente, i tempi di lavorabilità e di presa dichiarati.
- Evitare di aggiungere prodotto fresco (o acqua) ad un impasto già miscelato, anche parzialmente.
- Conservare il prodotto in ambiente fresco ed il più possibile asciutto: l'assorbimento di umidità può causare variazioni delle proprietà fisiche, tra cui la riduzione dei valori di durezza e l'allungamento dei tempi di lavorabilità e di presa. Evitare l'eccessiva esposizione all'aria, avendo cura di richiudere accuratamente la confezione dopo ogni prelievo.

per la vostra sicurezza

Durante l'utilizzo di FLASKER, raccomandiamo di:

- **Evitare di inalare la polvere.**
- **Indossare una protezione adeguata per gli occhi durante le fasi di taglio e rifinitura del modello.**
- **In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua corrente.**

confezionamenti

sacco 25 Kg in carta cucito + sacco interno PE 150 µm
cartone 20 Kg con maniglia + sacco interno PE 150 µm

stoccaggio

- **Conservare in ambiente fresco ed il più possibile asciutto, lontano da fonti di calore e umidità, ad una temperatura compresa tra 10 e 25 °C (50-77 °F).**
- **Raccomandiamo, una volta aperta la confezione, di richiuderla accuratamente o, meglio, di trasferire il prodotto in un contenitore richiudibile.**

scadenza

Per risultati ottimali, utilizzare il prodotto entro la data di scadenza riportata su ogni confezione. Eventuali scorte di prodotto dovrebbero essere ruotate in modo che il materiale più vecchio venga utilizzato per primo.

codice prodotto REGULAR SET (SLOW / FAST SET disponibili su richiesta)

FLASKER REGULAR SET	sacco 25 Kg	cartone 20 Kg	fusto 15 Kg	fusto 5 Kg	busta 1 Kg
bianco	GK13RW25S	GK13RW20C	-	-	-
avorio	GK13RI25S	GK13RI20C	-	-	-

La nostra attività di consulenza in relazione all'uso dei nostri prodotti, rilasciata sia in forma verbale, scritta o dimostrativa, si basa sullo stato attuale della tecnica odontoiatrica e delle nostre migliori conoscenze. Essa è da considerarsi solo come indicazione senza alcun valore vincolante, anche con riferimento ad eventuali diritti di terzi, e non esonera l'utente dall'eseguire propri controlli sui prodotti, onde appurarne l'idoneità all'applicazione ed ai fini previsti. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo, pertanto rientrano esclusivamente nella responsabilità dell'utente. Eventuali responsabilità di danni saranno limitate al solo valore della merce fornita e utilizzata dall'utente. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento, consigliamo di leggere sempre le istruzioni per ogni nuova confezione e di contattare Conphident in caso di dubbi derivanti da queste informazioni.